

Anatom Unit Optimus



De behandelunit om uw werk ge

Instrumentenbrug

De instrumentenslangen zijn zeer flexibel. De instrumenten hebben een variabele treksterkte, die naar eigen wens in te stellen is. Een uniek systeem van lucht en water, waardoor het aantal magneetventielen reduceert tot drie. Een minimum van delen van het systeem verhoogt de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de unit.

De instrumenten overlays zijn autoclaveerbaar en verstelbaar. De instrumenten brug is gemakkelijk te verwijderen voor reiniging.



Zuigslang houder

Door het 180° draaien van de slang houder, krijg je een open of gesloten systeem. Zuigslang houder kan eenvoudig worden versteld op de zijkant van de tafellade. De houder is gemonteerd op een uitschuifbare, gearticuleerd en telescopische draaibare stelling die eenvoudig is te verstellen.

Bedieningspaneel

Schakel Controle van de instrumenten brug evenals de stoelinstellingen.



Kwispedoor / fontijn

De kwispedoor is eenvoudig te plaatsen in een gunstige locatie voor de patiënt. Fontein kom en de spoelbeker zijn van glas en is gemakkelijk te reinigen in de vaatwasser.

ergonomisch, r

gemakkelijker te kunnen uitvoeren



Swivel unit behuizing

De hele unitbehuizing draait via de zijkant, dit maakt de instap voor rolstoelpatiënten of staande gemakkelijker.



Zuigstelsysteem

Afzuiging met perslucht betekent dat u direct een aanzienlijke afzuiging hebt van speeksel en ga zo maar door. Het systeem heeft een uitneembare filter, die eenvoudig te reinigen en uitneembaar is.

Cleaning System

Geïntegreerd systeem voor schoon water - Clean Unit. Ontworpen en gebouwd door Jan-Ake Hallen



robuust en betrouwbaar



Instrumentenpaneel positionering

De instrumentenbrug is gemakkelijk te draaien in een ergonomisch correcte behandelingspositie. De tandarts hoeft niet op te staan om instrumenten van de brug te pakken en de patiënt kan eenvoudig bij de fontein om zijn of haar mond te spoelen.

Ons doel met dit toestel is het verschaffen van een betrouwbaar en eenvoudig gereedschap. Al het materiaal is milieuvriendelijk recyclebaar omdat we hebben gekozen voor aluminium, roestvrij staal en glas. Geen slijtage van kunststof in de loop van de tijd, door veroudering en verkleuring.

Het unieke gevouwen slangstelsel betekent een zeer betrouwbaar systeem. Armgewrichten zijn uitgerust met bal en druklagermechanisme voor een veilige en betrouwbare manier van werken. Natuurlijk hebben we de nieuwste technologie op het gebied van zowel elektronica en mechanica. Bovendien, is de unit uitgerust met weinig bewegende delen die aan slijtage onderhevig zijn en vermijdt downtime. Een ergonomisch, robuust en betrouwbaar apparaat voor de jaren van dagelijkse werkzaamheden. Gemonteerd op de vloer of de stoel gemonteerde versie.

solident®

Solident Sweden AB
Testgatan 6 • 912 32 Vilhelmina
Tel: 0940-133 33, fax: 0940-121 28
e-post: dental@solident.se • www.solident.se

Uw leverancier:

 **dentalair**
Turn-Key Total Care!